

Etilotest monouso strumento di prevenzione e controllo

L'etilotest monouso CONTRALCO è lo strumento ideale per le campagne di sensibilizzazione, prevenzione e controllo dell'abuso di consumo di alcol alla guida.


Utilizzare un etilotest è il modo migliore per conoscere il proprio tasso d'alcolemia.



Fate il test prima di mettervi alla guida almeno 20 minuti dopo aver bevuto l'ultima bevanda alcolica.



Il kit CONTRALCO è composto da un dispositivo contenente il reagente ed un palloncino dotato di un boccaglio a valvola per la raccolta del campione d'aria espirata.

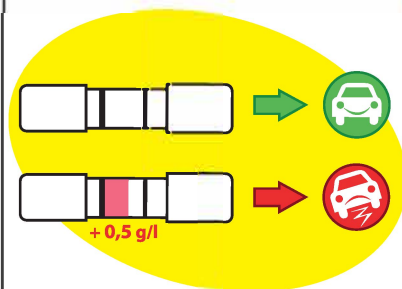

Se il reagente si colora siete oltre il limite consentito.

NON GUIDATE!

L'etilotest monouso CONTRALCO è disponibile in due versioni:

ZERO ASSOLUTO, per rilevare la presenza di minime quantità di alcol (si attiva a partire da 0,05 g/l), per il controllo della completa sobrietà degli utenti (neopatentati, guidatori professionali, medicina del lavoro)



0,5 g/l per la rilevazione della idoneità alla guida dopo il consumo di bevande alcoliche.



Confezionamenti del prodotto

STANDARD

Nelle versioni flow-pack, Cartoncino standard con promozione Etilometro virtuale per smart phone cALCOLapp

CONFEZIONE PERSONALIZZATA

Con le grafiche e i testi della vostra Società e della campagna da voi proposta

KIT SPECIALI

Etilotest + profilattico, per la prevenzione estesa

KIT Prevenzione*, per completare le attività di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio con un efficace strumento di comunicazione e di autocontrollo personale.

*Il kit contiene delle indicazioni per evitare e controllare l'abuso di alcol, informando su rischi e sanzioni.



Perchè scegliere Etilotest monouso CONTRALCO?

1. Perché è affidabile

Certificato secondo la normativa METROLOGICA NF 2014*, conforme alla normativa per i locali pubblici, validità garantita 24 mesi.

* performance garantite:
affidabilità risultato tra +10 e +40 °C,
conservazione tra -20 e +70°C



2. Perché è igienicamente sicuro


Il prodotto è monouso e confezionato singolarmente.
L'utilizzo del palloncino garantisce che non ci sia mai contatto tra la bocca dell'utente e il dispositivo con il reagente chimico.



Gli Etilotest non contengono sali di Cromo

3. Perché è semplice da utilizzare

Il palloncino si gonfia senza forzare l'espiazione in 3 secondi, il boccaglio "antireflusso" trattiene l'aria. Il test si attiva con un semplice movimento, inserito nel boccaglio consente l'uscita dell'aria e la misurazione dell'alcoemia ha subito inizio. La valutazione del risultato è inequivocabile, se il reagente si colora non si deve guidare.

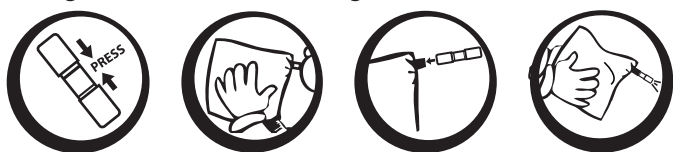


4. Perché Etilotest CONTRALCO è un efficace ed economico strumento di comunicazione

La personalizzazione della confezione con il vostro marchio e l'inserimento del codice QR renderanno più numerosi gli accessi alla vostra comunicazione on line (app, social, siti, questionari, concorsi).



5. Perché CONTRALCO ha un test per ogni necessità di controllo

Zero assoluto per neopatentati, autisti professionali, controlli medici e 0,5 g/l per tutti gli altri conducenti.

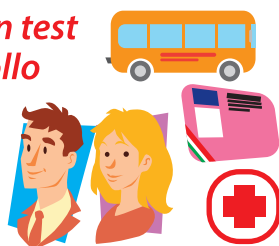

6. Perché gli Etilotest CONTRALCO consentono un controllo veloce, capillare ed economico del territorio

Grazie al costo contenuto e alla facile trasportabilità, possono essere dati in dotazione ad ogni pattuglia.



MODULO D'ORDINE



ETILOTTEST monouso	0,5 g/l	ZERO g/l	Confezione	Pezzi ordinati	Prezzo
CONTRALCO standard			flow-pack		
			cartoncino contralco		
grafica PERSONALIZZATA			cartoncino semplice		
			cartoncino avvolgente		
KIT prevenzione			Astuccio cartone		
Kit etilotest + profilattico			personalizzato		
			logo contralco		

Etilotest monouso, validità 24 mesi, **NON SI ACCETTANO RESI DI PRODOTTO SCADUTO**

Informazioni per la fatturazione

Ente, azienda o associazione

Partita iva*

Codice fiscale*

* se non esiste segnare con N.E.

Indirizzo (via e numero)

CAP

Località

Provincia

Indirizzare la fattura a (nome e cognome, ufficio - servizio, telefono)

Informazioni per la consegna (se diverse da quelle di fatturazione)

Ente, azienda o associazione

Indirizzo (via e numero)

CAP

Località

Provincia

Notificare la consegna a (nome e cognome, ufficio - servizio, telefono)

Data di consegna richiesta

Orari preferibili di consegna

Data

Firma (leggibile)